

- Ⓔ Mix ratio
- Ⓕ Mengverhouding
- Ⓖ Mischverhältnis
- Ⓗ Taux de mélange
- Ⓙ Proporción de la mezcla
- Ⓛ Proporção de mistura
- Ⓡ Rapporto di dosaggio
- Ⓜ Proporzjon tat-taħlita
- Ⓢ Mix ratio
- Ⓣ Blandingsforhold
- Ⓥ Blandningsförhållande
- Ⓦ Sekoitussuhde
- Ⓧ Segu vahekord

- Ⓨ Maisījuma sastāvdaļu attiecība
- Ⓩ Mišinio komponentų santykis
- ⓁⓂ Proporcje mieszanek
- ⓁⓃ Směšovací poměr
- ⓁⓄ Pomer miešania
- ⓁⓅ Kevelési arány
- ⓁⓆ Mešalno razmerje
- ⓁⓇ Raport de amestecare
- ⓁⓈ Смесительна пропорция
- ⓁⓉ Αναλογία ανάμιξης
- ⓁⓀ Karışım Oranı
- ⓁⓁ Пропорция смешивания
- ⓁⓁ 混合比率


- Ⓨ Dough time
- Ⓩ Deegtijd
- Ⓛ Teiganmischzeit
- ⓁⓂ Temps de fermentation
- ⓁⓃ Tiempo de formación de la masa
- ⓁⓄ Tempo de formação da pasta
- ⓁⓅ Tempo di solidificazione della pasta
- ⓁⓆ Pġin biex tiffirma l-ghagna
- ⓁⓇ Forberedningstid for dejmasse
- ⓁⓈ Deigtid
- ⓁⓉ Degtid
- ⓁⓀ Taikinan käsittelyaika
- ⓁⓁ Täidise aeg

- Ⓨ Maisījuma stingšanas laiks
- Ⓩ Mišinio stingimo laikas
- Ⓛ Czas utwardzania
- ⓁⓂ Čas tvrzení
- ⓁⓃ Čas tvrdnutia
- ⓁⓄ Massaállapot időtartama
- ⓁⓅ Čas gnetne mase
- ⓁⓆ Período de aşteptare
- ⓁⓇ Време на смесване
- ⓁⓈ Χρόνος ζύμωσης
- ⓁⓉ Hamur Süresi
- ⓁⓀ Время смешивания
- ⓁⓁ 練り時間

- Ⓨ Manual handling time
- Ⓩ Handmatige verwerkingstijd
- Ⓛ Manuelle Verarbeitungszeit
- ⓁⓂ Temps de traitement manuel
- ⓁⓃ Tiempo de procesamiento manual
- ⓁⓄ Tempo de manuseamento
- ⓁⓅ Tempo di lavorazione manuale
- ⓁⓆ Pġin ta' l-immaniġġjar manwali
- ⓁⓇ Manuel behandlingstid
- ⓁⓈ Manuell händteringstid
- ⓁⓉ Manuell hanteringstid
- ⓁⓀ Manuaalinen käsittelyaika
- ⓁⓁ Käsilaadimise aeg
- ⓁⓁ Uzraudzības rokas vadības režimā laiks

- ⓁⓁ Priežiūros rankinio valdymo režimu laikas
- ⓁⓁ Czas obróbki ręcznej
- ⓁⓁ Čas ručního zpracování
- ⓁⓁ Čas ručného spracovania
- ⓁⓁ Kézi feldolgozás időtartama
- ⓁⓁ Čas ročne obdelave
- ⓁⓁ Período de prelucrare manuală
- ⓁⓁ Време на ръчна обработка
- ⓁⓁ Χρόνος χειρισμού με το χέρι
- ⓁⓁ Elle çalıřtırma süresi
- ⓁⓁ Время ручной обработки
- ⓁⓁ 手作業時間

6

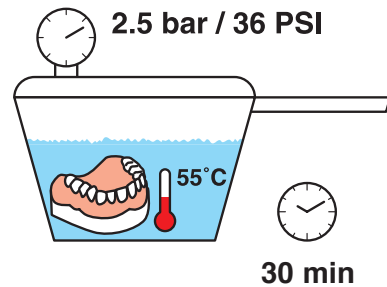

Vertex

**Implacryl
Cold**

GB	LV
NL	LT
D	PL
F	CZ
E	SK
P	H
I	SLO
M	RO
DK	BG
N	GR
S	TR
FIN	RUS
EST	J

Vertex-Dental B.V.
The Netherlands
© +31 (0)30 6976749
www.vertex-dental.com

i